




Návod k obsluze kompresorový inhalátor

Intec CN02WF2 Pingwin

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za koupi tohoto dětského kompresorového inhalátoru. Tento inhalátor je vysoce kvalitní přístroj pro inhalační léčbu astmatu, chronické bronchitidy a jiných onemocnění dýchacích cest. Přístroj pomoci tlaku vzduchu přeměňuje léčebný roztok v mlhu. Částice z takto rozptýlené mlžiny jsou tak malé, že proniknou i do těch nejhlebších oblastí plic, čímž je dosaženo maximálního účinku. Provoz a používání zařízení je velmi jednoduché. Pro inhalační terapii mohou být použity všechny běžné léky v tekuté podobě. Prostudujte prosím tyto pokyny pečlivě tak, abyste porozuměli všem funkcím a informacím tykající se bezpečnosti. Chceme, abyste byli se svým inhalátorem spokojeni.

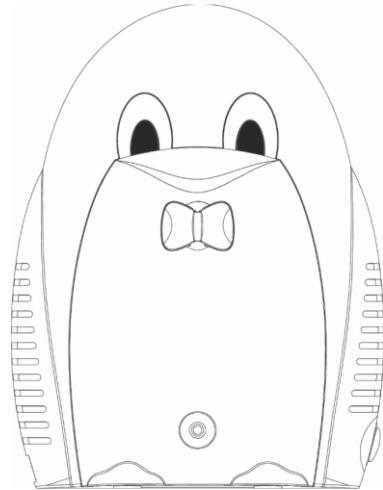

Obsah

1. Části přístroje
2. Popis součástí přístroje
3. V čem spočívá inhalační terapie?
4. Obecné informace
5. Bezpečnostní instrukce
6. Používání přístroje
7. Údržba a skladování přístroje
8. Záruka
9. Příslušenství
10. Technické údaje
11. Tipy pro řešení potíží
12. Legislativa

1. Části přístroje
2. Popis součástí přístroje



Nebulizační komora




Propojovací hadice



Kojenecký náustek



Inhalační maska

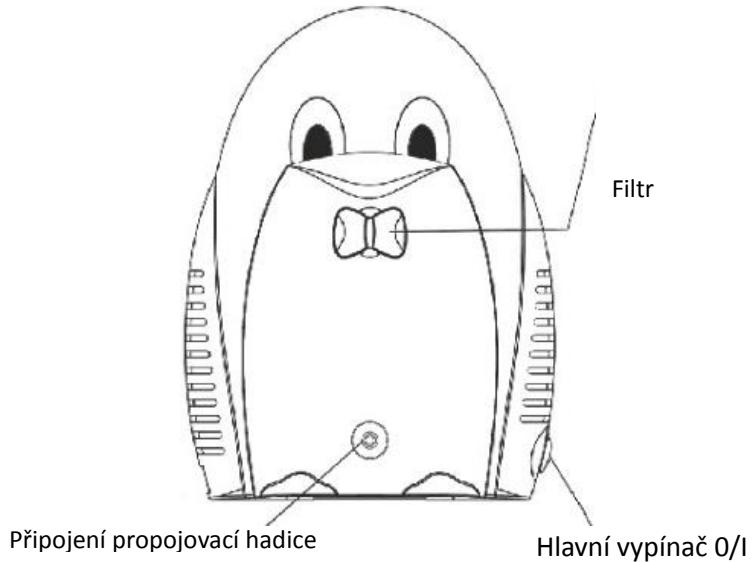

3. V čem spočívá inhalační terapie?

Inhalátor je zařízení pro tvorbu a rozprašování aerosolu. Slovo "Nebulizér" je odvozeno z latinského slova "nebul" (mlha, oblačnost) a bylo nejprve použito v roce 1874 pro zařízení, které změnilo kapalnou substanci do formy aerosolu pro léčebné účely. Jeden z prvních přenosných inhalátorů vytvořil J. Sales-Girons v Paříži v roce 1859. První inhalátory využívaly jako zdroje páry energii trysek a byly použity pro inhalaci par pryskyřic a antiseptických prostředků pro pacienty s tuberkulózou. V současné době se běžně používá termín "inhalátor" namísto "Nebulizér" („rozprašovač“).

Účelem inhalace je rychle dodat do dýchacích cest dávku terapeutického přípravku ve formě aerosolu. Souvislé, nepřetržité dodávání aerosolu během několika minut umožní vytvoření vysoké koncentrace léku v horních a dolních dýchacích cestách a plicích, s minimální pravděpodobností vedlejších účinků. Resp. je dosaženo efektivní bronchodialatační expanze průdušek a je možné vyhnout se nebo alespoň zkrátit pobyt v nemocnici. Inhalátor Intec CN02-WF2 Pingwin umožnuje použití celé řady léků, kdy zbytkový objem inhalačního roztoku je minimální a použití přístroje je spolehlivé a jednoduché. Děkujeme, že jste si zvolili právě tento přístroj. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni.

4. Obecné informace

Kompresorový inhalátor Intec je určen pro léčbu onemocnění dýchacích cest a plic medikamenty ve formě aerosolu v domácnosti.. Tento návod k obsluze Vám pomůže bezpečně a efektivně používat inhalátor Intec. Přístroj používejte jen v souladu s pravidly uvedenými v tomto návodu a jen k účelům zde popsaným.

Po funkční stránce se přístroj skládá z kompresoru vzduchu a rozprašovače (komora na tvorbu aerosolů). Vzduchový kompresor, vypínač a vzduchový filtr jsou spojeny v jedné skříni. Stlačený vzduch je přiváděn od vzduchového kompresoru hadičkou do rozprašovače, kde se tvoří aerosol. Chlazení přístroje probíhá vzduchem vstupujícím krytem přístroje.

5. Bezpečnostní instrukce

Poznámka: Doporučuje se pro všechny typy standardního inhalačního roztoku v tekuté formě dodávaného farmaceutickými společnostmi pro inhalační terapii.

Roztok pro inhalaci musí být připraven za sterilních podmínek na základě 0,9% chloridu sodného jako rozpouštědla. NEPOUŽÍVEJTE VODU (ANI PŘI BODU VARU) nebo destilovanou vodu k přípravě inhalačního roztoku. Nádobí, v němž se připravuje roztok, před použitím dezinfikujte varem. Způsob inhalace (ústy pomocí náustku nebo nosem za použití masky nebo trysky), množství používaného inhalačního roztoku a dávkování by měl být určen lékařem. Při použití přístroj položte na rovnou plochu stolu. Aby nedošlo k přehřátí zařízení, neblokujte přístup vzduchu k otvoru pro sání vzduchu. Děti by měly používat přístroj pod dohledem dospělé osoby. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky vytažením zástrčky ze zásuvky. Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu vlnkýma rukama. Nepokládejte přístroj do vody, výlevky nebo do sprchy. Nepoužívejte jej při koupání. Nedotýkejte se zařízení, pokud spadlo do vody. Okamžitě jej odpojte ze sítě. Před použitím se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen. Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých či ostrých předmětů. V případě, že zařízení nefunguje, přečtěte si „Tipy pro řešení potíží“. Používejte pouze příslušenství, která jsou navržena pro tento přístroj a uvedena v této příručce. **Toto zařízení nelze použít pro inhalační anestezii a umělou ventilaci.** Nevkládejte žádné předměty do otvorů v zařízení. Přístroj není určen pro venkovní použití

6. Používání přístroje

Příprava pro inhalaci

Důležité: Před prvním použitím přístroje je nutné přístroj vyčistit – viz odst. 1. oddílu „Údržba a skladování přístroje“.

1. Umístěte inhalátor na stůl před Vámi. Ujistěte se, zda je zařízení vypnuté (vypínač je v poloze "O"), a napájecí kabel není zapojen

do sítě.

2. Odstraňte vrchní část rozprašovače otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Naplňte spodní část nebulizační komory inhalačním roztokem. Dávka by neměla překročit hodnotu doporučenou Vaším lékařem. Objem roztoku je udán ryskou na obalu.
4. Složte nebulizační komoru (otáčením ve směru hodinových ručiček).
5. V závislosti na typu inhalace použijte náustek nebo masku. Tento díl je připojen přímo k horní části nebulizační komory. Držte komoru ve svislé poloze.

Důležité: Je doporučeno, aby každý pacient používal vlastní osobní náustek nebo masku.

6. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
7. Jeden konec inhalační trubice připevněte k inhalátoru a druhý k nebulizační komoře.
8. Zapněte inhalátor přepnutím hlavního vypínače do polohy "I". Chod inhalátoru signalizuje červené prosvícení vypínače. Přístroj je připraven k použití.

Provedení inhalace

Délka jednoho léčebného cyklu by neměla přesáhnout 20 minut. O vhodné délce inhalační terapie se poradíte se svým lékařem. Během inhalační terapie by pacient měl být vždy v klidu a uvolněný. Dýchání by mělo být pomalé a hluboké, tak aby přípravek mohl dobře zaplnit plíce a dosáhnout hlubokých částí průdušek. Krátce zadržte dech a pak pomalu vydechněte. Nepokoušejte se dýchat příliš rychle. Pokud máte pocit, že potřebujete přestávku – přerušte na chvíli inhalační terapii.

Dokončení inhalace

Je-li inhalační roztok spotřebován a čas inhalační terapie doporučený lékařem vypršel, vypněte zařízení tím, že přepnete hlavní vypínač do polohy "0" a odpojíte jej ze sítě. Pro dosažení lepšího léčebného efektu se po inhalační terapii nadýchejte čerstvého vzduchu. Po každém použití zařízení by měl být odstraněn zbytkový přípravek – viz odst. 1 oddílu „Údržba a skladování přístroje“.

7. Údržba a skladování přístroje

1. Přístroj a veškeré příslušenství pravidelně čistěte. Doporučuje se, aby veškeré doplňky byly otřeny 3% roztokem peroxidu vodíku s přídavkem 0,5% roztoku čisticího prostředku (např. prací prášek). Poté musí být rozprašovač a příslušenství opláchnuty proudem vody. Hubičky a nosní trysky mohou být dezinfikovány varem po dobu 10 minut nebo v autoklávu při 150 ° C. Po vyčištění všechny části přístroje vytřete do sucha měkkým hadříkem.
2. Pravidelně kontrolujte filtr a v případě znečištění jej vyměňte. Výměna filtru je doporučena nejméně jednou za rok.
3. Chraňte zařízení před přímým slunečním svitem a otresy či nárazy.
4. Neskladujte a nepoužívejte zařízení v blízkosti topných zařízení a otevřeného ohně.
5. Udržujte zařízení v čistotě a chraňte jej před prachem.
6. Chraňte zařízení před kontaktem s agresivními roztoky a rozpouštědly.
7. Veškeré opravy přístroje může provádět pouze autorizovaný servis.
8. Po uplynutí záruky doporučujeme čas od času nechat zkontrolovat technický stav přístroje autorizovaným servisem. Likvidaci zařízení provádějte v souladu s platnou legislativou.

8. Záruka

Přístroj je vyroben z vysoce kvalitních materiálů. Je zkonstruován tak, aby plně uspokojil potřeby zákazníka za předpokladu použití v souladu s tímto návodem k obsluze. Záruka na přístroj je 2 roky od data prodeje. Případné závady uplatňujte u distributora (BONECO CR, s.r.o. Na Podhoře 185, 588 13 Polná) nebo u prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili. Záruka se nevztahuje na případy mechanického poškození, na poškození po zásahu třetí osobou, na opotřebení dílů vzniklých nesprávným nebo nadměrným používáním nebo použitím k jinému účelu než je uvedeno v tomto návodu.

9. Příslušenství

Tělo inhalátoru (1 ks), Nebulizační nádoba (1 ks), Propojovací vzduchová hadice (1 ks), Inhalační náustek (1 ks), Dětská inhalační maska (1 ks), Dospělá inhalační maska (1 ks), Kojenecký Inhalační nástavec (1 ks), Filtr (5 ks), Obal, Návod k použití

10. Technické údaje

Model

Type

Příkon do

Rychlosť rozprášovania, približne:

Velikosť častic aerosolu

Stredná velikosť častic (MMAD)

Max. objem inhalačného roztoku

Zbytkový objem inhalačného roztoku

Provozný tlak kompresoru

Hlučnosť do

Napäť:

Provozní podmínky:

Teplota



Relativná vlhkosť vzduchu

Atmosférický tlak

Skladovací a prepravní podmínky:

Teplota

Relativná vlhkosť vzduchu

Atmosférický tlak

Hmotnosť

Velikosť (inhalačor)

Intec CN02-WF2

Kompresorový inhalátor

60 W

0,2 ml/min

0,5 – 10 µm

1,3 – 1,5 µm

6 ml

0,5 ml

0,7 – 1,2 Bar

55 dB

230V 50Hz

10 až 40° C

10 – 95 % Rh

86-106 kPa

-25 ° C až +70 ° C

do 95% Rh

50-106 kPa

1500 g / 1800 g včetně obalu a příslušenství

178 x 120 x 234 mm

11. Tipy pro řešení obtíží

Zařízení nefunguje::

- Zapněte hlavní vypínač. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Zapněte zařízení.

Žádne nebo malé rozprášovanie:

- Přidejte správné množství předepsaného léčiva do kalíšku.
- Ujistěte se, že inhalační set je správně sestaven a inhalační příslušenství je správně připojeno.
- Držte inhalační set správně. Nenaklánějte zařízení tak, že by úhel sestavy přesáhl 45 stupňů.
- Ujistěte se, že vzduchová hadice je správně připojena do sestavy kompresoru a rozprášovače.
- Ujistěte se, že vzduchová hadice není přeložená, zalomená nebo ohnutá. Zkontrolujte vzduchovou trubici, zda není poškozená.

V případě poškození vzduchové trubice je třeba ji nahradit novou.

Přístroj je velmi horký

- Během používání kompresor nesmí být ničím zakryt. V případě přehřátí přístroj vypněte a vyčkejte 40 minut před dalším použitím.

12. Legislativa

Elektronické přístroje nutno likvidovat v souladu s miestnimi platnymi predpisy, nikoliv s domacim odpadem. Zařízení, ktere již nepotrebuje, vratte do sbernych nadob s elektroodpadem, do sbernych dvorov apod. Nepatři do popelnic s domacim smesnym odpadem!



Používaní tohto přístroje nelze považovať jako náhradu za konzultaci s vašim lékařem.

Související normy: EN 13544-1; EN 60601-1; EN 60601-1-2; CE0197

Distributor:

CM Trade Via s.r.o., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Tel: +420 549 274 164, info@cm-trade.cz

Výrobce: Wega Handel GmbH, Herbert – Jensch Strasse 111, 15234, Frankfurt nad Odrou, Německo

Autorizovaný zástupce v EU: Shanghai International Trading Corp. GmbH, Eiffestrasse 80, 20537 Hamburk, Německo.

Verze: 15. 12. 2023

